

**10** Si le choc est déconseillé ou s'il a été délivré, "Commencer le massage cardiaque".

Pendant les compressions thoraciques, le ZOLL AED 3 émettra des messages Real CPR Help® concernant la qualité des compressions de RCP

**9** Si un choc est conseillé, "Appuyer sur le bouton de choc clignotant"

**1** Mettez le DA sous tension

**2** "Vérifier l'état de conscience"

**3** "Demander de l'aide"


**8** "Ne pas toucher la victime. Analyse en cours."

**7** "Appliquer les électrodes de défibrillation sur la poitrine nue du patient"

**6** "Si la victime est un enfant, appuyer sur le bouton Enfant"

**5** "Vérifier la respiration"

**4** "Ouvrir les voies respiratoires"

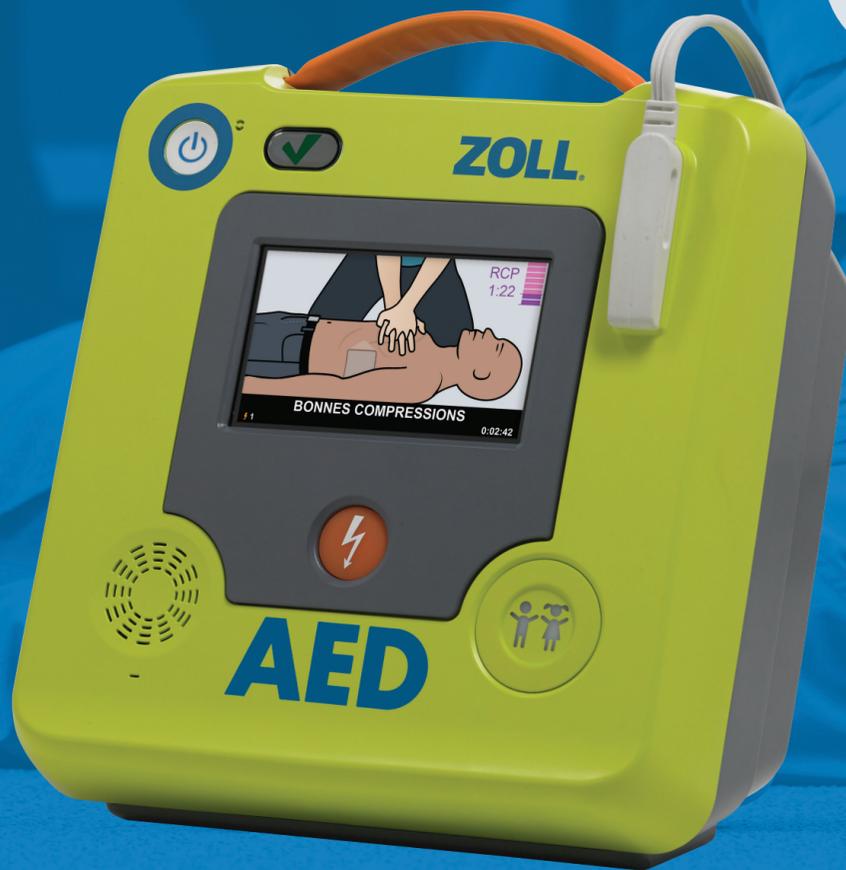

Pour plus d'informations sur le ZOLL AED 3, visitez le site [zoll.com](http://zoll.com) ou appelez le +1.978.421.9655.

**ZOLL**®